



DENTO-VIRACTIS MEDICAL DEVICES 77

DENTO-VIRACTIS

Descrição	Dento-Viractis 77 é concebido para limpeza desinfetante mediante fricção de dispositivos médicos invasivos e não invasivos reutilizáveis, que não podem ser esterilizados por métodos convencionais e que não podem ser desinfetados por imersão devido ao seu tamanho, à sua construção ou aos materiais de que são compostos. 
Áreas de aplicação	Adequado para uso em laboratórios de radiologia e clínicas dentárias. Também é indicado para limpeza e desinfecção de superfícies em contacto ou não com alimentos (por exemplo, cadeira dentária). Não utilizar em superfícies que não sejam dispositivos médicos reutilizáveis.
Características	✓ Agente de limpeza desinfetante de amplo espectro de atividade ✓ Fácil de usar mediante fricção húmida ✓ Fragrância agradável
Apresentação comercial	Garrafa de 1 litro com pulverizador Bidão de 5 litros Caixa de 120 toalhetes humedecidos

Instruções de utilização	Uso do spray: Recarregar o pulverizador. 1. Pulverizar para cobrir adequadamente a superfície (14 mg/cm² de acordo com NF T 72-281) ou sobre um pano limpo não tecido. 2. Limpar cuidadosamente o dispositivo médico reutilizável. 3. Deixar o produto atuar 5 minutos (15 min para C. difficile). Não enxaguar (exceto se houver contacto direto com a boca ou os dentes). 4. Utilizar um pano não tecido novo para cada equipamento. Uso de toalhetes: Limpar completamente o dispositivo médico reutilizável. 1. Deixar o produto atuar 5 minutos (15 minutos em caso de C. difficile). Não enxaguar (exceto as superfícies em contacto direto com a boca ou os dentes). 2. Mudar de toalhete para cada equipamento. 3. Fechar bem a caixa após o uso.
Precauções	PERIGO Líquido e vapor altamente inflamáveis. Provoca irritação ocular grave. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Usar óculos de proteção. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Eliminar o conteúdo e o recipiente num centro de recolha de resíduos perigosos, de acordo com a regulamentação local. Não reutilizar o recipiente. Marcação CE obtida em 2019.
Rotulagem	



DENTO-VIRACTIS MEDICAL DEVICES 77

Atividade antimicrobiana			Tempo de contacto
Bactericida	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	1 min
	EN 14561	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Acinetobacter baumannii	5 min
	EN 16615*	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	
Fungicida	EN 13624	Candida albicans	1 min
	EN 14562	Candida albicans, spargillus brasiliensis niger)	5 min
	EN 16615*	Candida albicans	
Virucida	EN 14476	Norovírus, HIV	30 seg
		HBV, Herpes vírus, Influenza vírus A/H1N1	1 min
		Adenovírus, Rotavírus, HCV	5 min
	EN 16777	Adenovírus, Norovírus, Vaccinia (Coronavírus, HBV, HCV, VRSH, Herpes vírus...)	
Esporicida	EN 17126	Clostridium difficile	15 min
	NF T 72-281**	Bacillus subtilis	5 min

* Protocolo específico para uso em toalhetes.

** Norma específica para uso em spray (seguido ou não de ação mecânica).

Uso profissional

Marcação CE0459 obtida em 2019. Dispositivo de classe IIb

Fabricante: SODEL - 190 rue René Barthélemy - 14100 Lisieux, FRANCE.

Versão 1: 04/2025