

Designação	TOALHETES MEDIBASE DESINFETANTES (100)
Referência	3160746
Foto do produto	
Descrição do produto	Toalhetes impregnados com uma solução de limpeza e desinfeção para superfícies, materiais, equipamentos e mobiliário que não sejam utilizados em contacto direto com géneros alimentícios ou alimentos para animais
Características e composição	Produto destinado a limpeza e desinfeção rápida: - De superfícies duras não porosas no setor dos cuidados de saúde e em ambientes comunitários (maçanetas de portas, bancadas de trabalho, móveis, instalações sanitárias, etc.) - De superfícies duras não porosas de dispositivos médicos não críticos, como parte do controlo de riscos microbiológicos relacionados com o ambiente (camas hospitalares, ferramentas de monitorização, conectores e cabos, etc.) Composição: A solução de impregnação inclui: Desinfetantes • Cloreto de didecildimetilamónio (n.º CAS: 7173-51-5): 0,29% (m/m); • < 5% de surfactantes não iónicos. • Perfume. Espectro de ação: 5 minutos a 20 °C: • Bactericida (EN 16615*, EN 13727*, EN 13697*, EN 1276*); • Leveduricida (EN 16615*, EN 13624*, EN 13697*, EN 1650*); • Atividade virucida limitada (EN 16615*, EN 14476*, EN 16777*). *3 g/l de albumina bovina + 3 ml/l de eritrócitos de ovelha **3 g/l de albumina bovina
Embalagem	Saqueta com 100 toalhetes
Prazo de validade	24 meses

Armazenagem	Conservar ao abrigo do gelo e não exceder 40 °C
Indicações de utilização	Instruções de utilização: Utilizar 4 toalhetes por m² de superfície a ser limpa e desinfetada, assegurando que a superfície fica completamente molhada. Deixar atuar durante 5 minutos. Não enxaguar. Renovar a aplicação sempre que necessário. Fechar bem a embalagem após cada utilização para evitar que os toalhetes sequem. É aconselhável testar o produto numa pequena área para verificar a sua compatibilidade com a superfície a ser tratada. Lista de materiais compatíveis disponível mediante solicitação. Produto não incompatível com materiais PC-ABS. Precauções de utilização: Lavar bem as mãos após a utilização. Evitar a libertação no ambiente. Eliminar o recipiente e os toalhetes nos devidos coletores de resíduos, de acordo com regulamentação local em vigor. Em caso de incidente, entrar em contacto com o centro antivenenos mais próximo.
Informações legais	Biocida TP2

Versão 1.0 – 19/12/2024