



FICHA TÉCNICA

OCTOPLUS

REVISÃO: R1

Data: março 2012

CARACTERÍSTICAS

As agulhas OCTOPLUS são esterilizadas por radiação gama, seladas e revestidas de silicone para injeção de uma única utilização.

São agulhas compatíveis com seringas dentárias com rosca europeia.

Em conformidade com a norma ISO_EN ISO 7885:2010. Medicina dentária. Agulhas estéreis para injeção de uma única utilização. E com a norma ISO 11137-1-2006 Esterilização de dispositivos médicos por radiação.

Cada agulha é fornecida numa embalagem primária, destinada a proteger a agulha e assegurar a manutenção da esterilidade e inviolabilidade. A parte da embalagem protetora correspondente ao comprimento útil de penetração pode ser utilizada como auxílio para fixar a agulha na seringa, sem necessidade de lhe tocar com as mãos.

O ponto de soldagem que une a tampa ao protetor da agulha garante a manutenção da esterilidade da agulha.

FINALIDADE

Indicadas para a administração de anestesia em carpules.

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A DIRETIVA 93/42/CE

Dispositivo médico da classe IIA

APRESENTAÇÃO

Infiltrativa. 30G Curta 0,3 x 21 mm. (Ref.: 01-020)

Infiltrativa. 30G Curta 0,3 x 25 mm. (Ref.: 01-016)

Troncular. 27G Longa 0,4 x 38 mm. (Ref.: 01-018)

Intraligamentar. 30G Extracurta 0,3 x 16 mm. (Ref.: 01-017)

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Inserir a agulha na seringa.
2. Quebrar a soldadura.
3. Girar e retirar a tampa.
4. Enroscar a cânula de plástico da agulha na rosca da seringa sem remover o protetor da agulha.
5. Retirar o protetor de agulha com um leve movimento de rotação antes de aplicar a anestesia.
6. Após a utilização: Desenroscar a agulha da seringa com muito cuidado para evitar picar-se acidentalmente.

ADVERTÊNCIAS

- Agulhas de injeção estéreis de uma única utilização.
- Não utilizar se o selo de garantia estiver quebrado.
- Não reutilizar.
- Não reesterilizar.

- Após a utilização, descartar a agulha num recipiente adequado, de acordo com a legislação em vigor.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Conservar à temperatura ambiente, evitando fontes de calor direto e humidade.

