



DISPOSITIVOS MÉDICOS

DENTASEPT®

Spray 60^{PRO}

INDICAÇÕES

Desinfecção rápida de dispositivos médicos não submersíveis e não invasivos. O uso de Dentasept® Spray 60 PRO depois de cada paciente previne o risco de infecção cruzada.

VANTAGENS DO PRODUTO

- ✓ Solução pronta para usar.
- ✓ À base de etanol
- ✓ Seca rapidamente sem deixar marcas.
- ✓ Eficaz em apenas 30 segundos contra todos os vírus envelopados¹
- ✓ Amplo espectro de atividade
- ✓ Perfume de limão
- ✓ Dispositivo médico de classe IIa (Diretiva 93/42/CEE, conforme alterada)

¹ O Instituto Robert Koch recomenda o uso de desinfetantes que alegam uma atividade virucida limitada para interromper a cadeia de infecção. Segundo este Instituto, uma atividade virucida limitada (eficaz contra vírus envelopados) corresponde a uma atividade contra o vírus Vaccinia e o BVDV.

PROPRIEDADES MICROBIOLÓGICAS A 20°C

Bactericida: EN 1040, EN 13727, EN 13697 - 30 segundos.
SARM: EN 13697 - 30 segundos.
Tuberculicida: EN 14348, EN 14563 - 30 segundos.
Micobactericida: EN 14348, EN 14563 - 5 minutos.
Leveduricida: EN 1275, EN 13624, EN 13697 - 30 segundos.
Fungicida: EN 1275, EN 13624, EN 13697 - 5 minutos.
Ativo contra BVDV (vírus modelo HCV), rotavírus, herpesvírus, coronavírus, adenovírus, PRV (vírus modelo HBV), VIH-1.
Vírus vaccinia - 30 segundos.
Ativo contra o calicivírus felino - 5 minutos.

COMPOSIÇÃO

Etanol, propionato de N,N-didecil-N-metil-poli(oxietil)amónio, excipientes.

EMBALAGENS

Recipiente spray de 1 litro.
Recipiente de 5 litros.



DISPOSITIVOS MÉDICOS

DENTASEPT® Spray 60 PRO

PROTOCOLO DE USO


Desinfecção rápida de dispositivos médicos não submersíveis e não invasivos. O uso de Dentasept® Spray 60 PRO depois de cada paciente previne o risco de infecção cruzada.

ANTES DE UTILIZAR

Colocar luvas apropriadas.

MODO DE UTILIZAÇÃO

- 1** ATENÇÃO: Antes de utilizar, verifique se a zona a ser tratada está limpa e é compatível com o álcool.
- 2** Pulverizar uniformemente e em quantidade suficiente sobre a zona a ser tratada. (+/- 30 ml/m², ou seja, aproximadamente 10 pulverizações).
- 3** Deixar atuar o Dentasept® Spray 60 PRO, assegurando que a zona permanece húmida durante o tempo de contacto recomendado. Aplicar uma segunda vez, se necessário.
- 4** Não é necessário enxaguar, a menos que o dispositivo médico entre em contacto com a pele ou as mucosas.

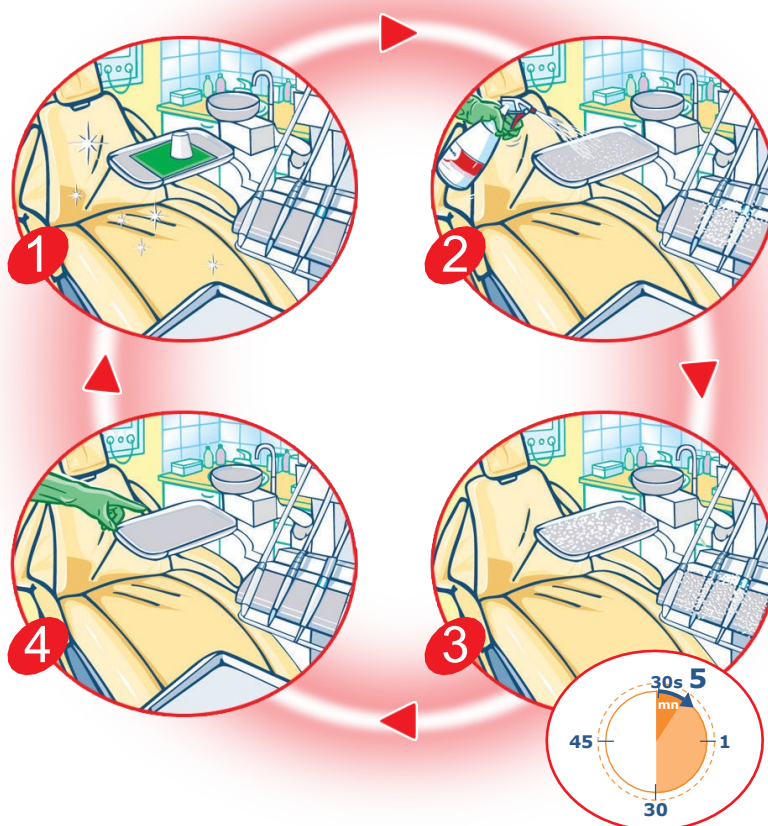

PRECAUÇÕES

Perigoso – respeitar as precauções de utilização. Dispositivo médico de classe IIa, CE 0459. Antes de utilizar, ler o rótulo e as informações relativas ao produto.

Conservar entre +5°C e +25°C.