

	TÍTULO: LACLEDIN SUPERFICIES SPRAY 700 ML	CÓDIGO: FT-SGC077.01
	DATA DE EMISSÃO: 27/MAIO/2021	SUBSTITUI: N/D
		N.º PÁG.: 1 de 3

CONTEÚDO

1. CARACTERÍSTICAS
2. FINALIDADE
3. CLASSIFICAÇÃO
4. APRESENTAÇÃO
5. NÚMERO DE REFERÊNCIA
6. MODO DE USAR
7. ADVERTÊNCIAS
8. IMAGEM

Elaborado por: 25606083E BEATRIZ CARDONA (C:A85234896) Assinatura/data	Firmado digitalmente por 25606083E BEATRIZ CARDONA (C:A85234896) Fecha: 2021.05.27 17:47:52 +02'00'	Revisto/Aprovado por: 11861266M MARÍA DEL PILAR MARÍN (C:A85234896) Assinatura/data	Digitally signed by 11861266M MARÍA DEL Date: 2021.05.28 12:36:42 +02'00'
---	--	---	--

A divulgação, utilização ou reprodução, total ou parcial, do presente conteúdo são proibidas sem autorização prévia e formal emitida por **Laboratorios Clarben, SA.**

Os documentos impressos ou descarregados devem ser verificados face à versão em vigor.

1. CARACTERÍSTICAS

- Solução hidroalcoólica para uso à base de digluconato de clorexidina e sal de amónio quaternário, com amplo espectro de ação para a desinfeção rápida e eficaz da superfície de dispositivos médicos não invasivos, superfícies extensas ou de difícil acesso de equipamentos biomédicos. Não requer diluição e garante uma proteção rápida e prolongada. Lactedin atua em 5 minutos contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, vírus incluindo VIH, VHB e VHC, e em 60 minutos contra micobactérias, incluindo a que causa a tuberculose.
- Espectro de ação:
 - Bactérias Gram-positivas e Gram-negativas
 - Micobactérias
 - Fungos
 - VIH
 - Hepatite B (VHB)
 - Hepatite C (VHC)
 - Ação na presença de matéria orgânica (sangue, saliva, exsudatos orgânicos...)
- Normas testadas: EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14561, EN 14562.
- Composição: Digluconato de clorexidina, cloreto de benzalcónio, etanol, álcool isopropílico.

2. FINALIDADE

Indicado para desinfetar a superfície de dispositivos médicos não invasivos, especialmente formulado para ambientes médicos e dentários.

3. CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo médico de classe IIA.

4. APRESENTAÇÃO

Spray 700 ml

5. NÚMERO DE REFERÊNCIA

Ref.: 07-018: LACLEDIN desinfetante de superficies spray 700 ml.

6. MODO DE USAR

- Agitar bem antes de usar e pulverizar diretamente sobre a superfície a ser tratada.
- Pulverize as superfícies e os objetos a serem desinfetados a uma distância de 30 cm até que estejam completamente humedecidos.
- Deixe o produto atuar e, por fim, secar com um pano ou papel descartável.

7. ADVERTÊNCIAS

- Após a abertura da embalagem, se o produto for armazenado corretamente, conservar até à data de validade indicada no rótulo.
- Não utilizar em superfícies sensíveis ao álcool.
- Apenas para uso profissional.
- Pode provocar uma reação alérgica.
- Provoca irritação ocular grave.
- Pode causar sonolência ou tonturas.
- Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Manter afastado do calor, fogo, faíscas e superfícies quentes.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não fumar.
- Armazenar em local bem ventilado.
- Manter o recipiente bem fechado.
- Conservar em ambiente fresco.
- Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.
- Lavar a pele em caso de contacto com a pele.
- Se entrar em contacto com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.
- Utilizar espuma resistente ao álcool ou dióxido de carbono para a extinção de incêndio.

8. IMAGEM

