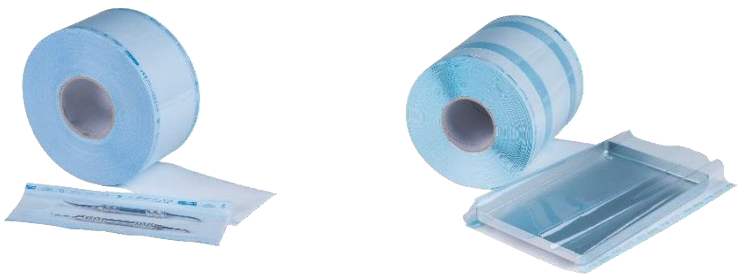


Designación	ROLLO DE ESTERILIZACION						
Reference(s)	5 cm	7,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	20 cm con 5,5 cm de fuelle
	3134962	3134963	3134964	3134965	3134966	3134967	3134968
Visual							
Descripción	Mangas de esterilización en rollos de 200 m, disponibles en 6 anchos + un tamaño con fuelle (rollo de 100 m).						
Características y datos técnicos	Papel médico: 60 gramos Película PET: 12/30 azul (12/40 para la funda con fuelle) ▪ Cada rollo está envuelto individualmente en película de plástico. Cierre de la bolsa: 170°C-200°C ▪ Esterilización por vapor ○ 121°C a 134°C ○ Indicadores pasan de rosa a marrón ▪ Esterilización por óxido de etileno ○ 30°C a 54°C ○ Indicadores pasan de azul a amarillo/marrón Cumple con las normas: - EN 868:5 - ISO 11607: 1-2 - ISO 1140-1						
Almacenamiento	GUARDAR EN UN LUGAR SECO Y ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA. NO UTILIZAR SI EL EMBALAJE ESTÁ DAÑADO						
De por vida	5 años a partir de la fecha de fabricación						
Almacenamiento tras la esterilización	Las bolsas y rollos esterilizados deben manipularse lo menos posible, guardarse a ser posible en armarios cerrados en un entorno limpio, a una temperatura y humedad controladas. Los sistemas de envasado Medibase mantendrán el contenido estéril durante un máximo de 6 meses (tabla 1 DIN 58953-8). En cualquier caso, los siguientes factores podrían interferir en la						

	esterilidad: - Proceso de esterilización; - Almacenamiento (las bolsas y rollos esterilizados deben manipularse lo menos posible, guardarse a ser posible en armarios cerrados en un entorno limpio, a una temperatura y humedad controladas. Si se mantienen como se describe anteriormente, a una temperatura entre 8 y 35 °C y una humedad relativa entre el 30 y el 70 %). - Tamaño y volumen del dispositivo médico. - Proceso de soldadura.
Informaciones legales	Dispositivo médico de clase I Marcado CE. Fabricante: E-LINE

Versión 4