



Filtek™

Bulk Fill
Fluído

O compósito fluído para preenchimento em bloco mais fácil de aplicar.

O compósito 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluído está disponível numa nova seringa ergonómica projetada para maior conforto e facilidade de injeção. Isto dá-lhe mais controlo e visibilidade para uma colocação precisa em restaurações profundas.

Reduz as bolhas e o desperdício

Praticamente nenhuma bolha ou material "run-on" durante a distribuição dá-lhe um melhor controlo.

Adeus à incerteza

O corpo da seringa verde indica o volume restante do material. Quando a sua seringa está vazia, só aparece o êmbolo branco.

Fácil de segurar e injetar

A placa triangular e o êmbolo tornam mais rápida e fácil a aderência ao dedo.



Cânula dobrável

Fácil de dobrar para um melhor acesso.



Principais benefícios

- Praticamente nenhuma bolha ou material "run-on"
- Cânula fácil de dobrar para um melhor acesso
- O design ergonómico é fácil de segurar e injetar
- Colocação injetável, num só passo, até 4 mm
- Excelente adaptação e baixo stress de contração

Pode ser aquecido para moldagem por injeção

Aqueça até 70 °C durante um máximo de uma hora, até 25 vezes.



Indicações

(graduais até 4 mm)



Base em rest. diretas (Classe I - II)



Base cavitária (Classe I - II)



Odontologia Mínimamente Invasiva (OMI)¹



Classe III



Classe V



Reparação de rest. indiretas (pequenos defeitos)



Reparações²



Bloqueador de undercut



Selante de fossas e fissuras



Reconstrução do coto³

Consulte o Manual de Instruções para obter uma lista completa de indicações.

Restauração Posterior simplificada



Preparar o dente e aplicar um adesivo, por exemplo, Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal.



Aplicar até 4 mm de 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido na cavidade preparada e curar, por exemplo, com Fotopolimerizador LED 3M™ Elipar™ DeepCure-S.



Colocar uma camada de 2 mm (mínimo) de revestimento de um compósito estético, como por exemplo 3M™ Filtek™ Universal Restorative, e fotopolimerizar.

Fotos clínicas gentilmente cedidas pelo Dr. Reich, Seefeld, Alemanha

Como realizar um pedido



Recargas 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido

As recargas das seringas incluem: 2 seringas de 2 g; 20 pontas de distribuição.

TONALIDADE	REFERÊNCIA 3M
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

REF. 3M	INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO
3740T	Pontas de distribuição de 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido, verde (20)



3M Oral Care
3M España, S.L. Sucursal em Portugal
Edifício Office Oriente,
Rua do Mar da China, n° 3 Piso 3A
1990-138 Lisboa
www.3M.com.pt

1. Incluindo pequenas restaurações oclusais que não suportam tensão.
2. Reparação de resina acrílica temporária e composta.
3. Em casos, onde pelo menos estejam da estrutura do dente coronal permanece para fornecer suporte estrutural à coroa.

3M, Elipar, Filtek e Scotchbond são marcas comerciais da 3M ou 3M Deutschland GmbH. Usado sob licença no Canadá. Por favor, recicle. Impresso na Espanha. © 3M 2020. Todos os direitos reservados. 70-2013-7232-6