

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Caros Profissionais de Saúde,

Muito obrigado pela confiança em nós depositada com a compra do novo líquido Multisteril CD Ctrl+Alt.

O novo líquido tem uma capacidade de deterção e desinfecção certificada, que irá aumentar o desempenho do dispositivo.

O Multisteril CD Ctrl+Alt foi desenvolvido para o SISTEMA MULTISTERIL em colaboração com importantes instituições, como a Universidade de Dresden, que testou e certificou a eficiência do sistema.

Visite a nossa página web para obter mais informações sobre este assunto.

http://www.tecnogaz.com/tecnogaz/product_top.aspx?id=1218

Se estiver a utilizar este líquido pela primeira vez, é importante que esvazie o reservatório do detergente antes de o encher novamente com o novo líquido. Por favor, siga as instruções no verso.

Se não o fizer, os dois líquidos irão misturar-se e formarão um líquido com aspeto leitoso.

Além disso, o novo líquido tem de ser utilizado numa concentração de 1%.

Por conseguinte, precisa de aceder ao menu do aparelho, seleccionar MODIFICAÇÃO DO CICLO e modificar a ENTRADA DE DETERGENTE.

Desta forma, poderá reduzir as despesas em 50%.

Com os melhores cumprimentos,
TECNO GAZ S.p.A.

TECNO-GAZ S.p.A

Capitale Sociale € 280.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA IT00570950345
R.E.A. PR 138927
Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma: PR 10061
tel. +39 0521 83.80 fax +39 0521 83.33.91
info@tecnogaz.com www.tecnogaz.com

Sede | Headquarters

Strada Cavalli, n. 4
C.A.P. 43038
Sala Baganza
Parma
Italia

Stabilimento 2 | Factory 2

Via VIII Marzo, n. 4
C.A.P. 42025
Cavriago
Reggio nell'Emilia
Italia

Magazzino | Warehouse

Via Aldo Moro, n. 9
C.A.P. 43038
Sala Baganza
Parma
Italia

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Esvaziamento do reservatório de detergente:

Para esvaziar completamente o reservatório de detergente, utilizar o dispositivo e, quando este pedir a introdução de novo detergente, pressionar e manter pressionado o botão **SELECT** e, simultaneamente, pressionar e manter pressionado o botão **OK**.

Após 5 segundos, a bomba peristáltica é acionada. Durante esta fase, o dispositivo emite um sinal acústico intermitente que é interrompido somente após a conclusão da fase. O detergente é descarregado diretamente na cuba através do bocal posicionado na tampa.

Depois de aproximadamente 10 minutos, abrir ligeiramente a tampa (sem ativar o sensor de abertura da tampa) e verificar que não sai detergente pelo bocal. Quando a operação de esvaziamento estiver concluída, interromper o processo pressionando o botão **STOP**.

Modificação dos ciclos

Selecionar o ciclo que se pretende modificar.

Pressionar o botão **OK** para visualizar o MENU.

Configurações disponíveis:

Standby ON - OFF -

Entrada de detergente 0 ÷ 6 % 1%

Aquecimento 30 ÷ 60 °C 10 °C

Função Degas SIM - NÃO -

Função SWEEP SIM - NÃO -

Limpeza por ultrassons 0 ÷ 30 min 1 min

Secagem SIM - NÃO -

Pressionar o botão **OK** para visualizar os parâmetros do ciclo.

Pressionar o botão **SELECT** para modificar o valor do parâmetro selecionado.

O menu dos parâmetros e das configurações dispõe de deslocamento cíclico.

Depois de concluída a configuração, selecionar **EXIT** e pressionar **SELECT** para sair do **MENU**.

As alterações serão guardadas.

MAIS DETALHES PODEM SER ENCONTRADOS NO MANUAL DO UTILIZADOR FORNECIDO COM O DISPOSITIVO.